

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСА И АКТИВНОГО КОМПЛЕКСА АЛИНЕКС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЗ ФОНОФЕРЕЗА

Цель:

Омоложение кожи путем запуска собственных репарационных процессов на клеточном уровне, укрепление местного иммунитета, улучшение цвета, тургора кожи.

Фонофорез использует воздействие на ткани механических колебаний с частотой свыше 16 кГц.

Расход на 1 процедуру:

Используемые препараты:	Расход на 1 процедуру
Очищающий гель	3 мл
Активный комплекс (Мультипептидный комплекс, комплекс Алинекс)	2 мл
Крем Hydro X	3 мл

Техника проведения процедуры:

- 1 Нанести очищающий гель на участок, слегка помассировать, остатки геля смыть водой.
- 2 Вскрыть ампулу с активным концентратом, нанести её содержимое (удобнее использовать шприц) на влажную кожу. Сначала наносить вокруг глаз, потом далее по массажным линиям. Впитать, поверх нанести УЗ гель.
- 3 Ультразвуковой манипулой совершить легкие движения по коже в течение 10 мин. Воздействие на ткани с частотой свыше 20 кГц.
- 4 Нанести восстанавливающий крем. Выдержать 2-3 минуты.

Длительность процедуры фонофореза от 10 до 30 минут. Курс включает 10 процедур с периодичностью 2-3 раза в неделю. Хороший эффект достигается после 5 процедур.